

Le Puy-en-Velay, le 20/02/2020

SERVICE DE SANTE ET DE SECOURS MEDICAL
CHEFFERIE

AFFAIRE SUIVIE PAR : PHARMACIEN DE CLASSE NORMALE V. FERREBOEUF
TEL. : 04.71.07.03.21
NOS REF. : SSSM/PD/AL

NOTE D'INFORMATION N° 2020 / 04

Objet : Mise en place des BAVU à usage unique adulte et pédiatrique

A compter du 1^{er} mars 2020 aura lieu progressivement la mise en place des BAVU à usage unique.

L'acheminement de ces BAVU se fera par la navette, qui en échange reprendra les anciens BAVU réutilisables.

Chaque sac de prompt secours comprendra :

- 1 BAVU adulte comprenant 2 tailles de masques (grand adulte + adulte médium).
- 1 BAVU pédiatrique avec 2 tailles de masques (enfant+ bébé).

Une fois utilisé le BAVU sera jeté dans les DASRI.

Les filtres pour BAVU et masques UU disparaissent de la dotation des sacs de secours.

Vous trouverez en pièce jointe à cette note la fiche technique de ces matériels.

LE MEDECIN-CHEF
DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA
HAUTE-LOIRE



MÉDECIN COLONEL PHILIPPE DUPUY

LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL
DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA
HAUTE-LOIRE



COLONEL CHRISTOPHE GLASIAN

SDIS43

*SERVICE DE SANTE ET DE
SECOURS MEDICAL*

**FICHE TECHNIQUE MATERIEL
FT13
BAVU UU SPUR ADULTE ET
PEDIATRIQUE**


APPLICATION :

A compter du 1^{er} mars 2020: utilisation des BAVU UU adulte et pédiatrique

DESCRIPTION :

Le BAVU SPUR II est composé de :

- 1 ballon à oxygène.
- 1 valve patient, orientable à 360°
- 1 valve d'arrivée oxygène
- 2 masques à bourrelet gonflable
- 1 tubulure de raccordement O₂. - Longueur 2 mètres

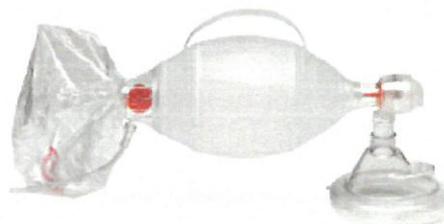

Ce matériel est à usage unique, non stérile.

Le SDIS43 met à disposition 2 modèles :

Modèle adulte (pour adultes et enfants pesant + de 30kg) avec 2 masques faciaux 1 taille grand adulte + 1 taille adulte Medium

Modèle pédiatrique (pour bébés et enfants pesant jusqu'à 30kg - 9 ans environ) avec 2 masques faciaux à bourrelet gonflable 1 taille enfant + 1 taille bébé.

L'insufflateur Ambu SPUR II est livré en sachet individuel avec code couleur pour une identification rapide de la taille.

Conforme aux normes de sécurité EN ISO 10651-4:2002 et ASTM F 920-93.

UTILISATION :

Destiné à la ventilation manuelle de patients adultes et pédiatriques.

Rangement dans les sacs de prompt secours :

- 1 BAVU adulte par sac
- 1 BAVU pédiatrique par sac

APPROVISIONNEMENT et ELIMINATION :

Commande sur « bon de commande VSAV- sac de secours ». cf intranet

Elimination dans les DASRI.